

neodisher® MediKlar



Aditivo líquido para aclarado en lavadoras profesionales.

Principales campos de aplicación:

Para el aclarado de instrumental quirúrgico, material de anestesia, contenedores y otros utensilios.

Propiedades:

neodisher mediklar es un producto para el aclarado de instrumental quirúrgico, material de anestesia, contenedores y otro material médico. Las buenas propiedades humectantes de **neodisher mediklar** permiten un secado rápido y sin huellas. **neodisher mediklar** permite acortar notablemente el tiempo de secado por lo que se reduce la duración global del proceso de limpieza y se reduce el consumo de energía.

Aplicación y dosificación:

Dosificación en el último aclarado: 0'3-1'0 ml/l mediante el dosificador adecuado

Datos técnicos:

Peso específico a 20°C: 1'02 g/cm³
pH (determinado en agua totalmente desalinizada a 20°C): 0'3 ml/l: 6'3
1 ml/l: 6'6

Viscosidad (concentrado, 20°C) < 10 mPas

Componentes:

De acuerdo con las recomendaciones de la UE:
<5% de agentes tensoactivos aniónicos, 5-15% agentes tensoactivos no iónicos
Otros componentes: ácidos orgánicos, conservantes

Caracterización CE:

neodisher mediklar cumple los requisitos de la ley sobre productos médicos y las directrices que de ella se derivan 93/42/EWG sobre productos médicos

Toxicología:

Se dispone de una valoración toxicológica de acuerdo con la EN 30993-1 (valoración biológica de productos médicos). En función de esa valoración neodisher puede ser clasificado como toxicológicamente inocuo.

Biodegradabilidad:

Cumple los requisitos de la ley sobre tolerancia medioambiental de detergentes y limpiadores del 19 de marzo de 1987 y con la disposición sobre biodegradabilidad de detergentes y limpiadores con componentes aniónicos y no iónicos del 30 de enero de 1997 en su redacción del 4 de junio de 1986 (biodegradabilidad de al menos un 90%).

Fisiología:

El producto no contiene pesticidas ni hidrocarburos clorados. Utilizado correctamente, el producto cumple con los requisitos de la ley sobre alimentos y productos de primera necesidad.

Indicaciones de almacenaje:

No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C

Advertencias de peligro y recomendaciones de seguridad:

neodisher mediklar está caracterizado como sustancia no nociva según los criterios de la disposición sobre sustancias peligrosas y las directrices de la UE que de ella se derivan.



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre
Tlfno: 981580770 - Fax: 981576013
Aptdo. Correos nº 196 - 15890 - SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com

