



neoform MED rapid



Desinfectante rápido para productos médicos

Solución lista para su uso

Aplicación:

- Para la desinfección rápida de superficies de productos médicos, como p. ej. mesas quirúrgicas en hospitales, consultas médicas y dentistas.
- Las superficies a desinfectar deben ser resistentes a desinfectantes con alcohol.
- No indicado para superficies de metacrilato.

Características especiales:

- Efecto bactericida, levuricida, tuberculicida y virus envueltos confirmado y certificado.
- Efectividad general después de un tiempo de contacto muy corto.
- Se seca sin dejar residuos - no necesita aclarado final.
- Breve tiempo de contacto.
- Secado sin residuos.
- También activo contra norovirus.
- Efecto desinfectante confirmado y certificado.

Aplicación y dosificación:

Pulverizar neoform MED rapid directamente sobre las superficies limpias y secas o aplicar sobre un trapo limpio desechable y pasar sobre las superficies. Las superficies deben ser completamente cubiertas por la solución de neoform MED rapid. Respetar el tiempo de contacto indicado en la tabla en función de la efectividad deseada. Una vez concluido el tiempo de contacto y el secado, se pueden utilizar las superficies y los equipos sin necesidad de aclarado agua.

	Contaminaciones normales 20 °C
Bactericida	Concentrado, 1 min
Levuricida	Concentrado, 1 min
Tuberculicida	Concentrado, 1 min
Virus envueltos (VIH, VBH, VCH)	Concentrado, 15 segundos

Activo contra
norovirus (VNM)

Concentrado,
2 min

Debido al alto contenido en alcohol, no se debe usar neoform MED rapid en grandes cantidades (máximo 50 ml por m²). Tener en cuenta los consejos de seguridad.

Consejos de uso:

- Solo para uso profesional.
- Para una dosificación económica y controlada recomendamos el uso de dosificadores auxiliares manuales.
- En general recomendamos el uso de guantes para trabajar con desinfectantes.
- No mezclar con otros productos.

Certificación:

El efecto desinfectante ha sido comprobado y certificado. Si lo desean pueden solicitar copia de este certificado.

Datos técnicos:

pH	6,5 - 7,5 (concentrado, 20 °C)
Viscosidad	< 10 mPa s (concentrado, 20 °C)
Punto de inflamación	27 °C según norma DIN 22719
Densidad	0,9 g/cm ³ (20 °C)

Composición:

Sustancias activas en 100 g:

35,0 g Propan-1-ol
25,0 g Etanol

Marcado CE:

neoform MED rapid cumple las exigencias de la directiva europea 93/42/CEE, anexo I.

Almacenamiento:

Almacenar a una temperatura entre -15 °C y 25 °C. Mantener el envase bien cerrado.

Con un almacenaje adecuado el producto se conserva durante 3 años. Fecha de caducidad, ver este símbolo



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 - Fax: 981576013
Aptdo. Correos n° 196 - 15890 - SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com





neoform MED rapid



Consejos y medidas de seguridad:

Información sobre seguridad y medio ambiente en las hojas de seguridad de la Unión Europea. Las podrá encontrar en la página web www.drweigert.com bajo la sección "Service".

neoform MED rapid está indicado para la desinfección de superficies pequeñas y equipos. Por motivos de seguridad se debe evitar vapores inflamables y fuentes de ignición.

- No usar más 50 ml por m² en el producto y nunca más de 100 ml por m² en la base.
- Asegurar una ventilación adecuada ya sea de forma natural o a través de aire acondicionado.
- Evitar posibles fuentes inflamables como p. ej. fuegos abiertos, superficies calientes o chispas eléctricas.
- No pulverizar directamente en las llamas o aparatos eléctricos conectados.

Si se respetan las instrucciones de uso, el producto es seguro y apropiado según la directiva de procesamiento de alimentos.

Desechar solo cuando el contenedor esté vacío y cerrado. Para la eliminación de residuos de producto consultar la hoja de seguridad.

Referencia y presentación

498647 - Caja de 12 botellas de 0,75 L.

MB 4070/3-2
06/2012



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 – Fax: 981576013
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com



DR. WEIGERT